



INSTRUÇÕES DE USO

NOME TÉCNICO: SISTEMAS DE FIXAÇÃO ORTOPÉDICOS E DISPOSITIVOS ASSOCIADOS

NOME COMERCIAL: SISTEMA TRAUUKIDS

Fabricante:

Traumédica Instrumentais e Implantes Ltda.

Rua Horácio Coutinho dos Santos, 233 - Parque Industrial Lisboa, CEP 13052-774

Campinas, São Paulo, Brasil

Fone / PABX (19) 3265-0874

contato@traumedica.com.br www.traumedica.com.br

Responsável Técnico:

Eng.º Joaquim de Souza Costa - CREA/SP 5062842207

Registro ANVISA nº: 80057410059

PRODUTO NÃO ESTÉRIL – ESTERILIZAR ANTES DO USO

PRODUTO DE USO ÚNICO – NÃO REUTILIZAR

1. Descrição detalhada do dispositivo médico, incluindo os fundamentos de seu funcionamento e sua ação, seu conteúdo ou composição, quando aplicável, assim como relação dos acessórios destinados a integrar o produto.

1.1 Identificação técnica do dispositivo médico, conforme item 3.2 do FFIPM, e informações gráficas.

Tabela 1: Identificação do Sistema TrauKids

Nome Técnico: SISTEMAS DE FIXAÇÃO ORTOPÉDICOS E DISPOSITIVOS ASSOCIADOS		
Nome Comercial: SISTEMA TRAUKIDS		
Enquadramento: Resolução - RDC Nº 594, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021: Art. 25		
Critérios	Agrupamento em sistema ou família de placas para síntese óssea	
I - Natureza do Material	Metálico e não absorvível	Todas as placas e parafusos são construídas em aço inox
II - Forma	Especial - com conformações e/ou extremidades especiais	Todas as placas possuem conformações ou extremidades especiais.
III - Rigidez de fixação	Fixação rígida	Apresenta furos rosqueados ou sistemas de travamento

1.2 Descrição do dispositivo médico

O Sistema TrauKids é indicado para fixação rígida temporária de fragmentos ósseos de fraturas ou osteotomias e correção de deformidades angulares femorais em crianças e adolescentes com idades entre 3 e 16 anos.

Esse produto é apresentado em diversos modelos e tamanhos de placas e parafusos para que o cirurgião faça sua escolha de acordo com as diferentes estruturas anatômicas. A Figura 1 apresenta uma possível montagem do Sistema TrauKids.



Figura 1 - Montagem do Sistema TrauKids
(Imagem meramente ilustrativa)

1.3 Composição

A Tabela 2 apresenta a classificação da matéria-prima utilizada nos produtos.

Tabela 2 - Classificação química da matéria-prima dos produtos deste processo de registro.

Produto	Material	Norma Aplicada
Placas	Aço Inoxidável, na condição trabalhado a frio	ASTM F139*
Parafusos		ASTM F138**

* Conforme Norma ASTM F-139 - "Standard Specification for Wrought 18Chromium-14Nickel-2.5Molybdenum Stainless Steel Sheet and Strip for Surgical Implants".

** Conforme Norma ASTM F138 - "Standard Specification for Wrought 18Chromium-14Nickel-2.5Molybdenum Stainless Steel Bar and Wire for Surgical Implants".

1.4 Acessórios

O Sistema TrauKids é caracterizado como sistema aberto e não possui acessórios.

1.5 Fundamentos de funcionamento e ação

Após a escolha da placa, procede-se à preparação do sítio cirúrgico por meio da perfuração da região para determinar o diâmetro e comprimento apropriados do parafuso. Em sequência, a placa é posicionada, seguida pela realização das reduções anatômicas e inserção de todos os parafusos, resultando na obtenção de uma fixação estável dos fragmentos ósseos.

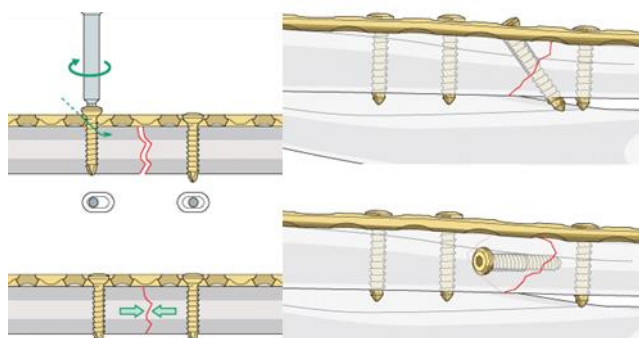


Figura 2 – Fundamentos de funcionamento e ação do Sistema TrauKids

1.6 Modelos Comerciais

O Sistema TrauKids fabricado pela Traumédica apresentam-se nas seguintes dimensões que permitem o profissional escolher o modelo mais adequado, conforme o caso clínico.

Apresentação das placas do Sistema Traukids estão disponíveis nos modelos e dimensões na tabela 3.

Tabela 3 - Apresentação das placas do Sistema Traukids

IMAGEM ILUSTRATIVA	CÓDIGO	MODELO	DIMENSÕES
	1201209003	PLACA PEDIATRICA DISTAL DE FÊMUR 90° X 3 FUROS - 3,5 MM	74 MM

	1201209004	PLACA PEDIATRICA DISTAL DE FÊMUR 90° X 4 FUROS - 3,5 MM	87 MM
	1201209005	PLACA PEDIATRICA DISTAL DE FÊMUR 90° X 5 FUROS - 3,5 MM	100 MM
	1201209006	PLACA PEDIATRICA DISTAL DE FÊMUR 90° X 6 FUROS - 3,5 MM	113 MM
	1201209007	PLACA PEDIATRICA DISTAL DE FÊMUR 90° X 7 FUROS - 3,5 MM	126 MM
	1201209008	PLACA PEDIATRICA DISTAL DE FÊMUR 90° X 8 FUROS - 3,5 MM	139 MM
	1201209009	PLACA PEDIATRICA DISTAL DE FÊMUR 90° X 9 FUROS - 3,5 MM	152 MM
	1201209010	PLACA PEDIATRICA DISTAL DE FÊMUR 90° X 10 FUROS - 3,5 MM	165 MM
	1201310003	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 100° X 3 FUROS - 3,5 MM	80 MM
	1201310004	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 100° X 4 FUROS - 3,5 MM	93 MM
	1201310005	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 100° X 5 FUROS - 3,5 MM	106 MM
	1201310006	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 100° X 6 FUROS - 3,5 MM	119 MM
	1201310007	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 100° X 7 FUROS - 3,5 MM	132 MM
	1201310008	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 100° X 8 FUROS - 3,5 MM	145 MM
	1201310009	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 100° X 9 FUROS - 3,5 MM	158 MM
	1201310010	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 100° X 10 FUROS - 3,5 MM	171 MM
	1201411003	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 110° X 3 FUROS - 3,5 MM	80 MM
	1201411004	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 110° X 4 FUROS - 3,5 MM	93 MM
	1201411005	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 110° X 5 FUROS - 3,5 MM	106 MM
	1201411006	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 110° X 6 FUROS - 3,5 MM	119 MM
	1201411007	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 110° X 7 FUROS - 3,5 MM	132 MM
	1201411008	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 110° X 8 FUROS - 3,5 MM	145 MM
	1201411009	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 110° X 9 FUROS - 3,5 MM	158 MM
	1201411010	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 110° X 10 FUROS - 3,5 MM	171 MM
	1201512003	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 120° X 3 FUROS - 3,5 MM	74 MM
	1201512004	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 120° X 4 FUROS - 3,5 MM	87 MM
	1201512005	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 120° X 5 FUROS - 3,5 MM	100 MM
	1201512006	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 120° X 6 FUROS - 3,5 MM	113 MM
	1201512007	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 120° X 7 FUROS - 3,5 MM	126 MM
	1201512008	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 120° X 8 FUROS - 3,5 MM	139 MM
	1201512009	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 120° X 9 FUROS - 3,5 MM	152 MM
	1201512010	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 120° X 10 FUROS - 3,5 MM	165 MM
	1201613003	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 130° X 3 FUROS - 3,5 MM	74 MM
	1201613004	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 130° X 4 FUROS - 3,5 MM	87 MM
	1201613005	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 130° X 5 FUROS - 3,5 MM	100 MM
	1201613006	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 130° X 6 FUROS - 3,5 MM	113 MM
	1201613007	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 130° X 7 FUROS - 3,5 MM	126 MM
	1201613008	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 130° X 8 FUROS - 3,5 MM	139 MM
	1201613009	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 130° X 9 FUROS - 3,5 MM	152 MM
	1201613010	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 130° X 10 FUROS - 3,5 MM	165 MM
	1201815003	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 150° X 3 FUROS - 3,5 MM	71 MM
	1201815004	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 150° X 4 FUROS - 3,5 MM	84 MM
	1201815005	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 150° X 5 FUROS - 3,5 MM	97 MM

	1201815006	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 150° X 6 FUROS - 3,5 MM	110 MM
	1201815007	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 150° X 7 FUROS - 3,5 MM	123 MM
	1201815008	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 150° X 8 FUROS - 3,5 MM	136 MM
	1201815009	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 150° X 9 FUROS - 3,5 MM	149 MM
	1201815010	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 150° X 10 FUROS - 3,5 MM	162 MM
	1201909003	PLACA PEDIATRICA DISTAL DE FÊMUR 90° X 3 FUROS - 5,0 MM	90.60 MM
	1201909004	PLACA PEDIATRICA DISTAL DE FÊMUR 90° X 4 FUROS - 5,0 MM	107.60 MM
	1201909005	PLACA PEDIATRICA DISTAL DE FÊMUR 90° X 5 FUROS - 5,0 MM	124.60 MM
	1201909006	PLACA PEDIATRICA DISTAL DE FÊMUR 90° X 6 FUROS - 5,0 MM	141.60 MM
	1201909007	PLACA PEDIATRICA DISTAL DE FÊMUR 90° X 7 FUROS - 5,0 MM	158.60 MM
	1201909008	PLACA PEDIATRICA DISTAL DE FÊMUR 90° X 8 FUROS - 5,0 MM	175.60 MM
	1201909009	PLACA PEDIATRICA DISTAL DE FÊMUR 90° X 9 FUROS - 5,0 MM	192.60 MM
	1201909010	PLACA PEDIATRICA DISTAL DE FÊMUR 90° X 10 FUROS - 5,0 MM	209.60 MM
	1202010003	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 100° X 3 FUROS - 5,0 MM	99 MM
	1202010004	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 100° X 4 FUROS - 5,0 MM	116 MM
	1202010005	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 100° X 5 FUROS - 5,0 MM	133 MM
	1202010006	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 100° X 6 FUROS - 5,0 MM	150 MM
	1202010007	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 100° X 7 FUROS - 5,0 MM	167 MM
	1202010008	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 100° X 8 FUROS - 5,0 MM	184 MM
	1202010009	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 100° X 9 FUROS - 5,0 MM	201 MM
	1202010010	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 100° X 10 FUROS - 5,0 MM	218 MM
	1202111003	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 110° X 3 FUROS - 5,0 MM	99 MM
	1202111004	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 110° X 4 FUROS - 5,0 MM	116 MM
	1202111005	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 110° X 5 FUROS - 5,0 MM	133 MM
	1202111006	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 110° X 6 FUROS - 5,0 MM	150 MM
	1202111007	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 110° X 7 FUROS - 5,0 MM	167 MM
	1202111008	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 110° X 8 FUROS - 5,0 MM	184 MM
	1202111009	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 110° X 9 FUROS - 5,0 MM	201 MM
	1202111010	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 110° X 10 FUROS - 5,0 MM	218 MM
	1202212003	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 120° X 3 FUROS - 5,0 MM	90.60 MM
	1202212004	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 120° X 4 FUROS - 5,0 MM	107.60 MM
	1202212005	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 120° X 5 FUROS - 5,0 MM	124.60 MM
	1202212006	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 120° X 6 FUROS - 5,0 MM	141.60 MM
	1202212007	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 120° X 7 FUROS - 5,0 MM	158.60 MM
	1202212008	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 120° X 8 FUROS - 5,0 MM	175.60 MM
	1202212009	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 120° X 9 FUROS - 5,0 MM	192.60 MM
	1202212010	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 120° X 10 FUROS - 5,0 MM	209.60 MM
	1202313003	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 130° X 3 FUROS - 5,0 MM	90.60 MM
	1202313004	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 130° X 4 FUROS - 5,0 MM	107.60 MM
	1202313005	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 130° X 5 FUROS - 5,0 MM	124.60 MM
	1202313006	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 130° X 6 FUROS - 5,0 MM	141.60 MM
	1202313007	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 130° X 7 FUROS - 5,0 MM	158.60 MM

	1202313008	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 130° X 8 FUROS - 5,0 MM	175.60 MM
	1202313009	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 130° X 9 FUROS - 5,0 MM	192.60 MM
	1202313010	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 130° X 10 FUROS - 5,0 MM	209.60 MM
	1202515003	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 150° X 3 FUROS - 5,0 MM	86 MM
	1202515004	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 150° X 4 FUROS - 5,0 MM	103 MM
	1202515005	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 150° X 5 FUROS - 5,0 MM	120 MM
	1202515006	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 150° X 6 FUROS - 5,0 MM	137 MM
	1202515007	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 150° X 7 FUROS - 5,0 MM	154 MM
	1202515008	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 150° X 8 FUROS - 5,0 MM	171 MM
	1202515009	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 150° X 9 FUROS - 5,0 MM	188 MM
	1202515010	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 150° X 10 FUROS - 5,0 MM	205 MM
	1202614003	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 140° X 3 FUROS - 3.5 MM	79 MM
	1202614004	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 140° X 4 FUROS - 3.5 MM	92 MM
	1202614005	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 140° X 5 FUROS - 3.5 MM	105 MM
	1202614006	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 140° X 6 FUROS - 3.5 MM	118 MM
	1202614007	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 140° X 7 FUROS - 3.5 MM	131 MM
	1202614008	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 140° X 8 FUROS - 3.5 MM	144 MM
	1202614009	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 140° X 9 FUROS - 3.5 MM	157 MM
	1202614010	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 140° X 10 FUROS - 3.5 MM	170 MM
	1202714003	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 140° X 3 FUROS - 5.0 MM	99 MM
	1202714004	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 140° X 4 FUROS - 5.0 MM	116 MM
	1202714005	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 140° X 5 FUROS - 5.0 MM	133 MM
	1202714006	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 140° X 6 FUROS - 5.0 MM	150 MM
	1202714007	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 140° X 7 FUROS - 5.0 MM	167 MM
	1202714008	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 140° X 8 FUROS - 5.0 MM	184 MM
	1202714009	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 140° X 9 FUROS - 5.0 MM	201 MM
	1202714010	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 140° X 10 FUROS - 5.0 MM	218 MM
	1202809002	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 90° X 2 FUROS - 3,5 MM	66 MM
	1202809003	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 90° X 3 FUROS - 3,5 MM	79 MM
	1202809004	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 90° X 4 FUROS - 3,5 MM	92 MM
	1202911002	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 110° X 2 FUROS - 3,5 MM	66 MM
	1202911003	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 110° X 3 FUROS - 3,5 MM	79 MM
	1202911004	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 110° X 4 FUROS - 3,5 MM	92 MM
	1203013002	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 130° X 2 FUROS - 3,5 MM	61.5 MM
	1203013003	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 130° X 3 FUROS - 3,5 MM	74.5 MM
	1203013004	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 130° X 4 FUROS - 3,5 MM	87.5 MM
	120310902525	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 2 FUROS X LÂMINA 25 - 3,5 MM	62,75 MM

	120310902530	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 2 FUROS X LÂMINA 30 - 3,5 MM	62,75 MM
	120310902535	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 2 FUROS X LÂMINA 35 - 3,5 MM	62,75MM
	120310903525	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 25 - 3,5 MM	75,75 MM
	120310903530	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 30 - 3,5 MM	75,75 MM
	120310903535	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 35 - 3,5 MM	75,75 MM
	120320900625	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 25 - 3,5 MM	77,75 MM
	120320900630	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 30 - 3,5 MM	77,75 MM
	120320900635	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 35 - 3,5 MM	77,75 MM
	120320900640	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 40 - 3,5 MM	77,75 MM
	120320900645	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 45 - 3,5 MM	77,75 MM
	120320900650	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 50 - 3,5 MM	77,75 MM
	120330901025	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 25 - 3,5 MM	79,5 MM
	120330901030	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 30 - 3,5 MM	79,5 MM
	120330901035	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 35 - 3,5 MM	79,5 MM
	120330901040	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 40 - 3,5 MM	79,5 MM
	120330901045	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 45 - 3,5 MM	79,5 MM
	120330901050	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 50 - 3,5 MM	79,5 MM
	120341000625	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 100° X 3 FUROS X LÂMINA 25 - 3,5 MM	81,5 MM
	120341000630	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 100° X 3 FUROS X LÂMINA 30 - 3,5 MM	82,4 MM
	120341000635	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 100° X 3 FUROS X LÂMINA 35 - 3,5 MM	83,3 MM
	120341000640	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 100° X 3 FUROS X LÂMINA 40 - 3,5 MM	84,1 MM
	120341000645	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 100° X 3 FUROS X LÂMINA 45 - 3,5 MM	85 MM
	120341000650	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 100° X 3 FUROS X LÂMINA 50 - 3,5 MM	85,9 MM
	120351300340	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 3 FUROS X LÂMINA 40 - 3,5 MM	94,3 MM
	120351300345	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 3 FUROS X LÂMINA 45 - 3,5 MM	97,5 MM
	120351300350	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 3 FUROS X LÂMINA 50 - 3,5 MM	100,7 MM
	120351300355	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 3 FUROS X LÂMINA 55 - 3,5 MM	103,9 MM
	120351300360	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 3 FUROS X LÂMINA 60 - 3,5 MM	107,2 MM
	120351300440	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 40 - 3,5 MM	107,3 MM
	120351300445	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 45 - 3,5 MM	110,5 MM
	120351300450	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 50 - 3,5 MM	113,7 MM
	120351300455	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 55 - 3,5 MM	116,9 MM
	120351300460	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 60 - 3,5 MM	120,2 MM
	120360900640	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 40 - 5,0 MM	115,0 MM
	120360900645	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 45 - 5,0 MM	115,0 MM
	120360900650	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 50 - 5,0 MM	115,0 MM
	120360900655	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 55 - 5,0 MM	115,0 MM
	120360900660	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 60 - 5,0 MM	115,0 MM
	120360900665	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 65 - 5,0 MM	115,0 MM

	120360900670	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 70 - 5,0 MM	115,0 MM
	120370901440	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 40 - 5,0 MM	118,50 MM
	120370901445	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 45 - 5,0 MM	118,50 MM
	120370901450	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 50 - 5,0 MM	118,50 MM
	120370901455	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 55 - 5,0 MM	118,50 MM
	120370901460	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 60 - 5,0 MM	118,50 MM
	120370901465	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 65 - 5,0 MM	118,50 MM
	120370901470	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 70 - 5,0 MM	118,50 MM
	120381300045	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 45 - 5,0 MM	135,6 MM
	120381300050	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 50 - 5,0 MM	138,8 MM
	120381300055	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 55 - 5,0 MM	142 MM
	120381300060	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 60 - 5,0 MM	145,2 MM
	120381300065	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 65 - 5,0 MM	148,4 MM
	120381300070	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 70 - 5,0 MM	151,7 MM
	120381300075	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 75 - 5,0 MM	154,9 MM
	120381300080	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 80 - 5,0 MM	158,1 MM
	120390902525	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 2 FUROS X LÂMINA 25 - 3,5 MM	62,75 MM
	120390902530	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 2 FUROS X LÂMINA 30 - 3,5 MM	62,75 MM
	120390902535	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 2 FUROS X LÂMINA 35 - 3,5 MM	62,75MM
	120390903525	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 25 - 3,5 MM	75,75 MM
	120390903530	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 30 - 3,5 MM	75,75 MM
	120390903535	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 35 - 3,5 MM	75,75 MM
	120400900625	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 25 - 3,5 MM	77,75 MM
	120400900630	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 30 - 3,5 MM	77,75 MM
	120400900635	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 35 - 3,5 MM	77,75 MM
	120400900640	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 40 - 3,5 MM	77,75 MM
	120400900645	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 45 - 3,5 MM	77,75 MM
	120400900650	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 50 - 3,5 MM	77,75 MM
	120410901025	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 25 - 3,5 MM	79,50 MM
	120410901030	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 30 - 3,5 MM	79,50 MM
	120410901035	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 35 - 3,5 MM	79,50 MM
	120410901040	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 40 - 3,5 MM	79,50 MM
	120410901045	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 45 - 3,5 MM	79,50 MM
	120410901050	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 50 - 3,5 MM	79,50 MM
	120421000625	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 100° X 3 FUROS X LÂMINA 25 - 3,5 MM	81,50 MM
	120421000630	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 100° X 3 FUROS X LÂMINA 30 - 3,5 MM	82,40 MM
	120421000635	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 100° X 3 FUROS X LÂMINA 35 - 3,5 MM	83,30 MM
	120421000640	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 100° X 3 FUROS X LÂMINA 40 - 3,5 MM	84,10 MM
	120421000645	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 100° X 3 FUROS X LÂMINA 45 - 3,5 MM	85,00 MM
	120421000650	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 100° X 3 FUROS X LÂMINA 50 - 3,5 MM	85,90 MM
	120431300340	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 3 FUROS X LÂMINA 40 - 3,5 MM	94,3 MM
	120431300345	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 3 FUROS X LÂMINA 45 - 3,5 MM	97,5 MM

	120431300350	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 3 FUROS X LÂMINA 50 - 3,5 MM	100,7 MM
	120431300355	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 3 FUROS X LÂMINA 55 - 3,5 MM	103,9 MM
	120431300360	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 3 FUROS X LÂMINA 60 - 3,5 MM	107,2 MM
	120431300440	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 40 - 3,5 MM	107,3 MM
	120431300445	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 45 - 3,5 MM	110,5 MM
	120431300450	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 50 - 3,5 MM	113,7 MM
	120431300455	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 55 - 3,5 MM	116,9 MM
	120431300460	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 60 - 3,5 MM	120,2 MM
	120440900640	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 40 - 5,0 MM	115,0 MM
	120440900645	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 45 - 5,0 MM	115,0 MM
	120440900650	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 50 - 5,0 MM	115,0 MM
	120440900655	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 55 - 5,0 MM	115,0 MM
	120440900660	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 60 - 5,0 MM	115,0 MM
	120440900665	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 65 - 5,0 MM	115,0 MM
	120440900670	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 70 - 5,0 MM	115,0 MM
	120450901440	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 40 - 5,0 MM	118,50 MM
	120450901445	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 45 - 5,0 MM	118,50 MM
	120450901450	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 50 - 5,0 MM	118,50 MM
	120450901455	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 55 - 5,0 MM	118,50 MM
	120450901460	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 60 - 5,0 MM	118,50 MM
	120450901465	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 65 - 5,0 MM	118,50 MM
	120450901470	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 70 - 5,0 MM	118,50 MM
	120461300045	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 45 - 5,0 MM	135,6 MM
	120461300050	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 50 - 5,0 MM	138,8 MM
	120461300055	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 55 - 5,0 MM	142 MM
	120461300060	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 60 - 5,0 MM	145,2 MM
	120461300065	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 65 - 5,0 MM	148,4 MM
	120461300070	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 70 - 5,0 MM	151,7 MM
	120461300075	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 75 - 5,0 MM	154,9 MM
	120461300080	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 80 - 5,0 MM	158,1 MM

Apresentação dos Parafusos do Sistema TrauKids estão disponíveis nos modelos e dimensões, conforme na Tabela 4.

Tabela 4 - Apresentação dos Parafusos do Sistema TrauKids

Imagem Ilustrativa	Código	Modelo	Diâmetro da Rosca (mm)
	43053510	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X10.0 MM	
	43053512	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X12.0 MM	
	43053514	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X14.0 MM	
	43053516	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X16.0 MM	

Traumédica Instrumentais e Implantes Ltda.

Rua Horácio Coutinho dos Santos, 233 - Parque Industrial Lisboa, CEP 13052-774

Campinas, São Paulo, Brasil

Fone/Fax (19) 3265-0874

contato@traumédica.com.br www.traumédica.com.br

9 / 39

	43053518	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X18.0 MM	Ø 3,50 MM
	43053520	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X20.0 MM	
	43053522	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X22.0 MM	
	43053524	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X24.0 MM	
	43053526	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X26.0 MM	
	43053528	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X28.0 MM	
	43053530	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X30.0 MM	
	43053532	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X32.0 MM	
	43053534	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X34.0 MM	
	43053536	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X36.0 MM	
	43053538	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X38.0 MM	
	43053540	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X40.0 MM	
	43053542	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X42.0 MM	
	43053544	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X44.0 MM	
	43053546	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X46.0 MM	
	43053548	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X48.0 MM	
	43053550	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X50.0 MM	
	43053552	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X52.0 MM	
	43053554	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X54.0 MM	
	43053556	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X56.0 MM	
	43053558	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X58.0 MM	
	43053560	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X60.0 MM	
	43053562	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X62.0 MM	
	43053564	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X64.0 MM	
	43053566	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X66.0 MM	
	43053568	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X68.0 MM	
	43053570	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X70.0 MM	
	43053572	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X72.0 MM	
	43053574	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X74.0 MM	
	43053576	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X76.0 MM	
	43053578	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X78.0 MM	
	43053580	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X80.0 MM	
	43053585	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X85.0 MM	
	43053590	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X90.0 MM	
	43103510	TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50X10.0 MM	Ø 3,50 MM
	43103512	TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50X12.0 MM	
	43103514	TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50X14.0 MM	
	43103516	TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50X16.0 MM	
	43103518	TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50X18.0 MM	
	43103520	TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50X20.0 MM	
	43103522	TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50X22.0 MM	
	43103524	TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50X24.0 MM	
	43103526	TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50X26.0 MM	
	43103528	TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50X28.0 MM	
	43103530	TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50X30.0 MM	
	43103532	TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50X32.0 MM	
	43103534	TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50X34.0 MM	
	43103536	TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50X36.0 MM	
	43103538	TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50X38.0 MM	
	43103540	TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50X40.0 MM	
	43103542	TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50X42.0 MM	
	43103544	TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50X44.0 MM	
	43103546	TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50X46.0 MM	
	43103548	TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50X48.0 MM	
	43103550	TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50X50.0 MM	
	43103552	TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50X52.0 MM	
	43103554	TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50X54.0 MM	
	43103556	TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50X56.0 MM	
	43103558	TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50X58.0 MM	
	43103560	TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50X60.0 MM	
	43103562	TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50X62.0 MM	

	43103564	TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50X64.0 MM	
	43103566	TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50X66.0 MM	
	43103568	TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50X68.0 MM	
	43103570	TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50X70.0 MM	
	43103572	TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50X72.0 MM	
	43103574	TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50X74.0 MM	
	43103576	TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50X76.0 MM	
	43103578	TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50X78.0 MM	
	43103580	TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50X80.0 MM	
	43103585	TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50X85.0 MM	
	43103590	TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50X90.0 MM	
	43113510	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X10.0 MM	Ø 3,50 MM
	43113512	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X12.0 MM	
	43113514	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X14.0 MM	
	43113516	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X16.0 MM	
	43113518	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X18.0 MM	
	43113520	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X20.0 MM	
	43113522	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X22.0 MM	
	43113524	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X24.0 MM	
	43113526	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X26.0 MM	
	43113528	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X28.0 MM	
	43113530	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X30.0 MM	
	43113532	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X32.0 MM	
	43113534	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X34.0 MM	
	43113536	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X36.0 MM	
	43113538	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X38.0 MM	
	43113540	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X40.0 MM	
	43113542	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X42.0 MM	
	43113544	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X44.0 MM	
	43113546	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X46.0 MM	
	43113548	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X48.0 MM	
	43113550	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X50.0 MM	
	43113552	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X52.0 MM	
	43113554	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X54.0 MM	
	43113556	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X56.0 MM	
	43113558	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X58.0 MM	
	43113560	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X60.0 MM	
	43113562	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X62.0 MM	
	43113564	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X64.0 MM	
	43113566	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X66.0 MM	
	43113568	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X68.0 MM	
	43113570	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X70.0 MM	
	43113572	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X72.0 MM	
	43113574	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X74.0 MM	
	43113576	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X76.0 MM	
	43113578	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X78.0 MM	
	43113580	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X80.0 MM	
	43113585	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X85.0 MM	
	43113590	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X90.0 MM	
	43123510	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X10.0 MM	Ø 3,50 MM
	43123512	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X12.0 MM	
	43123514	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X14.0 MM	
	43123516	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X16.0 MM	
	43123518	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X18.0 MM	
	43123520	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X20.0 MM	
	43123522	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X22.0 MM	
	43123524	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X24.0 MM	
	43123526	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X26.0 MM	
	43123528	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X28.0 MM	
	43123530	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X30.0 MM	

	43123532	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X32.0 MM	
	43123534	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X34.0 MM	
	43123536	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X36.0 MM	
	43123538	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X38.0 MM	
	43123540	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X40.0 MM	
	43123542	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X42.0 MM	
	43123544	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X44.0 MM	
	43123546	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X46.0 MM	
	43123548	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X48.0 MM	
	43123550	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X50.0 MM	
	43123552	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X52.0 MM	
	43123554	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X54.0 MM	
	43123556	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X56.0 MM	
	43123558	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X58.0 MM	
	43123560	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X60.0 MM	
	43123562	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X62.0 MM	
	43123564	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X64.0 MM	
	43123566	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X66.0 MM	
	43123568	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X68.0 MM	
	43123570	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X70.0 MM	
	43123572	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X72.0 MM	
	43123574	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X74.0 MM	
	43123576	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X76.0 MM	
	43123578	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X78.0 MM	
	43123580	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X80.0 MM	
	43123585	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X85.0 MM	
	43123590	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50X90.0 MM	
	20410	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X10.0 PASSO 1.25 MM	Ø 3,50 MM
	20412	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X12.0 PASSO 1.25 MM	
	20414	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X14.0 PASSO 1.25 MM	
	20416	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X16.0 PASSO 1.25 MM	
	20418	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X18.0 PASSO 1.25 MM	
	20420	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X20.0 PASSO 1.25 MM	
	20422	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X22.0 PASSO 1.25 MM	
	20424	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X24.0 PASSO 1.25 MM	
	20426	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X26.0 PASSO 1.25 MM	
	20428	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X28.0 PASSO 1.25 MM	
	20430	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X30.0 PASSO 1.25 MM	
	20432	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X32.0 PASSO 1.25 MM	
	20434	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X34.0 PASSO 1.25 MM	
	20436	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X36.0 PASSO 1.25 MM	
	20438	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X38.0 PASSO 1.25 MM	
	20440	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X40.0 PASSO 1.25 MM	
	20442	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X42.0 PASSO 1.25 MM	
	20444	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X44.0 PASSO 1.25 MM	
	20446	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X46.0 PASSO 1.25 MM	
	20448	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X48.0 PASSO 1.25 MM	
	20450	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X50.0 PASSO 1.25 MM	
	20452	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X52.0 PASSO 1.25 MM	
	20454	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X54.0 PASSO 1.25 MM	
	20456	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X56.0 PASSO 1.25 MM	
	20458	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X58.0 PASSO 1.25 MM	
	20460	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X60.0 PASSO 1.25 MM	
	20462	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X62.0 PASSO 1.25 MM	
	20464	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X64.0 PASSO 1.25 MM	
	20466	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X66.0 PASSO 1.25 MM	
	20468	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X68.0 PASSO 1.25 MM	
	20470	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X70.0 PASSO 1.25 MM	
	20472	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X72.0 PASSO 1.25 MM	

	20474	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X74.0 PASSO 1.25 MM	
	20476	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X76.0 PASSO 1.25 MM	
	20478	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X78.0 PASSO 1.25 MM	
	20480	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X80.0 PASSO 1.25 MM	
	20482	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X82.0 PASSO 1.25 MM	
	20484	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X84.0 PASSO 1.25 MM	
	20486	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X86.0 PASSO 1.25 MM	
	20488	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X88.0 PASSO 1.25 MM	
	20490	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X90.0 PASSO 1.25 MM	
	20492	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X92.0 PASSO 1.25 MM	
	20494	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X94.0 PASSO 1.25 MM	
	20496	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X96.0 PASSO 1.25 MM	
	20498	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X98.0 PASSO 1.25 MM	
	204100	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X100.0 PASSO 1.25 MM	
	204102	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X102.0 PASSO 1.25 MM	
	204104	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X104.0 PASSO 1.25 MM	
	204106	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X106.0 PASSO 1.25 MM	
	204108	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X108.0 PASSO 1.25 MM	
	204110	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X110.0 PASSO 1.25 MM	
	204112	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X112.0 PASSO 1.25 MM	
	204114	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X114.0 PASSO 1.25 MM	Ø 4,50 MM
	204116	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X116.0 PASSO 1.25 MM	
	204118	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X118.0 PASSO 1.25 MM	
	204120	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X120.0 PASSO 1.25 MM	
	20714	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X14.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	20716	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X16.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	20718	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X18.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	20720	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X20.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	20722	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X22.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	20724	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X24.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	20726	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X26.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	20728	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X28.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	20730	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X30.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	20732	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X32.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	20734	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X34.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	20736	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X36.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	20738	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X38.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	20740	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X40.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	20742	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X42.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	20744	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X44.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	20746	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X46.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	20748	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X48.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	20750	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X50.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	20752	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X52.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	20754	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X54.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	20756	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X56.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	20758	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X58.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	20760	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X60.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	20762	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X62.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	20764	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X64.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	20766	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X66.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	20768	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X68.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	20770	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X70.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	20772	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X72.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	20774	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X74.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	20776	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X76.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	20778	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X78.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	20780	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X80.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	20782	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X82.0 MM AUTO ROSQUEANTE	

	20784	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X84.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	20786	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X86.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	20788	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X88.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	20790	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X90.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	20792	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X92.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	20794	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X94.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	20796	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X96.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	20798	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X98.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	207100	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X100.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	207102	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X102.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	207104	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X104.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	207106	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X106.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	207108	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X108.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	207110	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X110.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	207112	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X112.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	207114	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X114.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	207116	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X116.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	207118	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X118.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	207120	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X120.0 MM AUTO ROSQUEANTE	
	021214	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X14.0 MM	Ø 4,50 MM
	021216	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X16.0 MM	
	021218	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X18.0 MM	
	021220	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X20.0 MM	
	021222	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X22.0 MM	
	021224	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X24.0 MM	
	021226	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X26.0 MM	
	021228	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X28.0 MM	
	021230	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X30.0 MM	
	021232	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X32.0 MM	
	021234	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X34.0 MM	
	021236	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X36.0 MM	
	021238	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X38.0 MM	
	021240	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X40.0 MM	
	021242	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X42.0 MM	
	021244	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X44.0 MM	
	021246	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X46.0 MM	
	021248	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X48.0 MM	
	021250	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X50.0 MM	
	021252	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X52.0 MM	
	021254	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X54.0 MM	
	021256	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X56.0 MM	
	021258	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X58.0 MM	
	021260	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X60.0 MM	
	021262	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X62.0 MM	
	021264	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X64.0 MM	
	021266	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X66.0 MM	
	021268	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X68.0 MM	
	021270	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X70.0 MM	
	021272	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X72.0 MM	
	021274	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X74.0 MM	
	021276	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X76.0 MM	
	021278	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X78.0 MM	
	021280	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X80.0 MM	
	021282	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X82.0 MM	
	021284	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X84.0 MM	
	021286	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X86.0 MM	
	021288	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X88.0 MM	
	021290	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X90.0 MM	
	021292	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X92.0 MM	

	021294	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X94.0 MM	
	021296	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X96.0 MM	
	021298	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X98.0 MM	
	0212100	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X100.0 MM	
	0212102	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X102.0 MM	
	0212104	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X104.0 MM	
	0212106	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X106.0 MM	
	0212108	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X108.0 MM	
	0212110	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X110.0 MM	
	0212112	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X112.0 MM	
	0212114	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X114.0 MM	
	0212116	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X116.0 MM	
	0212118	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X118.0 MM	
	0212120	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X120.0 MM	Ø 4,90 MM
	124914	PARAFUSO LOCKING Ø 4.90X14.0 MM	
	124916	PARAFUSO LOCKING Ø 4.90X16.0 MM	
	124918	PARAFUSO LOCKING Ø 4.90X18.0 MM	
	124920	PARAFUSO LOCKING Ø 4.90X20.0 MM	
	124922	PARAFUSO LOCKING Ø 4.90X22.0 MM	
	124924	PARAFUSO LOCKING Ø 4.90X24.0 MM	
	124926	PARAFUSO LOCKING Ø 4.90X26.0 MM	
	124928	PARAFUSO LOCKING Ø 4.90X28.0 MM	
	124930	PARAFUSO LOCKING Ø 4.90X30.0 MM	
	124932	PARAFUSO LOCKING Ø 4.90X32.0 MM	
	124934	PARAFUSO LOCKING Ø 4.90X34.0 MM	
	124936	PARAFUSO LOCKING Ø 4.90X36.0 MM	
	124938	PARAFUSO LOCKING Ø 4.90X38.0 MM	
	124940	PARAFUSO LOCKING Ø 4.90X40.0 MM	
	124942	PARAFUSO LOCKING Ø 4.90X42.0 MM	
	124944	PARAFUSO LOCKING Ø 4.90X44.0 MM	
	124946	PARAFUSO LOCKING Ø 4.90X46.0 MM	
	124948	PARAFUSO LOCKING Ø 4.90X48.0 MM	
	124950	PARAFUSO LOCKING Ø 4.90X50.0 MM	
	124952	PARAFUSO LOCKING Ø 4.90X52.0 MM	
	124954	PARAFUSO LOCKING Ø 4.90X54.0 MM	
	124956	PARAFUSO LOCKING Ø 4.90X56.0 MM	
	124958	PARAFUSO LOCKING Ø 4.90X58.0 MM	
	124960	PARAFUSO LOCKING Ø 4.90X60.0 MM	
	124962	PARAFUSO LOCKING Ø 4.90X62.0 MM	
	124964	PARAFUSO LOCKING Ø 4.90X64.0 MM	
	124966	PARAFUSO LOCKING Ø 4.90X66.0 MM	
	124968	PARAFUSO LOCKING Ø 4.90X68.0 MM	
	124970	PARAFUSO LOCKING Ø 4.90X70.0 MM	
	124975	PARAFUSO LOCKING Ø 4.90X75.0 MM	
	124980	PARAFUSO LOCKING Ø 4.90X80.0 MM	
	124985	PARAFUSO LOCKING Ø 4.90X85.0 MM	
	124990	PARAFUSO LOCKING Ø 4.90X90.0 MM	

1.7 Compatibilidade entre as Placas e Parafusos do Sistema TrauKids

Tabela 5 – Tabela de compatibilidade dimensional entre Placas e Parafusos do Sistema TrauKids

CÓDIGO	PLACAS TRAUKIDS	CÓDIGO	PARAFUSOS TRAUKIDS
1201209003	PLACA PEDIATRICA DISTAL DE FÊMUR 90° X 3 FUROS - 3,5 MM	43053510 A 43053590 43103510 A 43103590 43113510 A 43113590 43123510 A 43123590 20410 A 204120	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X"L" PASSO 1.25 MM
1201209004	PLACA PEDIATRICA DISTAL DE FÊMUR 90° X 4 FUROS - 3,5 MM		
1201209005	PLACA PEDIATRICA DISTAL DE FÊMUR 90° X 5 FUROS - 3,5 MM		
1201209006	PLACA PEDIATRICA DISTAL DE FÊMUR 90° X 6 FUROS - 3,5 MM		
1201209007	PLACA PEDIATRICA DISTAL DE FÊMUR 90° X 7 FUROS - 3,5 MM		
1201209008	PLACA PEDIATRICA DISTAL DE FÊMUR 90° X 8 FUROS - 3,5 MM		
1201209009	PLACA PEDIATRICA DISTAL DE FÊMUR 90° X 9 FUROS - 3,5 MM		
1201209010	PLACA PEDIATRICA DISTAL DE FÊMUR 90° X 10 FUROS - 3,5 MM		
1201310003	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 100° X 3 FUROS - 3,5 MM	43053510 A 43053590 43103510 A 43103590 43113510 A 43113590 43123510 A 43123590 20410 A 204120	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X"L" PASSO 1.25 MM
1201310004	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 100° X 4 FUROS - 3,5 MM		
1201310005	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 100° X 5 FUROS - 3,5 MM		
1201310006	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 100° X 6 FUROS - 3,5 MM		
1201310007	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 100° X 7 FUROS - 3,5 MM		
1201310008	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 100° X 8 FUROS - 3,5 MM		
1201310009	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 100° X 9 FUROS - 3,5 MM		
1201310010	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 100° X 10 FUROS - 3,5 MM		
1201411003	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 110° X 3 FUROS - 3,5 MM	43053510 A 43053590 43103510 A 43103590 43113510 A 43113590 43123510 A 43123590 20410 A 204120	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X"L" PASSO 1.25 MM
1201411004	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 110° X 4 FUROS - 3,5 MM		
1201411005	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 110° X 5 FUROS - 3,5 MM		
1201411006	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 110° X 6 FUROS - 3,5 MM		
1201411007	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 110° X 7 FUROS - 3,5 MM		
1201411008	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 110° X 8 FUROS - 3,5 MM		
1201411009	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 110° X 9 FUROS - 3,5 MM		
1201411010	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 110° X 10 FUROS - 3,5 MM		
1201512003	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 120° X 3 FUROS - 3,5 MM	43053510 A 43053590 43103510 A 43103590 43113510 A 43113590 43123510 A 43123590	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM
1201512004	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 120° X 4 FUROS - 3,5 MM		
1201512005	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 120° X 5 FUROS - 3,5 MM		

Traumédica Instrumentais e Implantes Ltda.

Rua Horácio Coutinho dos Santos, 233 - Parque Industrial Lisboa, CEP 13052-774
 Campinas, São Paulo, Brasil
 Fone/Fax (19) 3265-0874
contato@traumedica.com.br www.traumédica.com.br

1201512006	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 120° X 6 FUROS - 3,5 MM	20410 A 204120	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X"L" PASSO 1.25 MM
1201512007	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 120° X 7 FUROS - 3,5 MM		
1201512008	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 120° X 8 FUROS - 3,5 MM		
1201512009	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 120° X 9 FUROS - 3,5 MM		
1201512010	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 120° X 10 FUROS - 3,5 MM		
1201613003	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 130° X 3 FUROS - 3,5 MM	43053510 A 43053590 43103510 A 43103590 43113510 A 43113590 43123510 A 43123590 20410 A 204120	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X"L" PASSO 1.25 MM
1201613004	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 130° X 4 FUROS - 3,5 MM		
1201613005	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 130° X 5 FUROS - 3,5 MM		
1201613006	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 130° X 6 FUROS - 3,5 MM		
1201613007	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 130° X 7 FUROS - 3,5 MM		
1201613008	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 130° X 8 FUROS - 3,5 MM		
1201613009	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 130° X 9 FUROS - 3,5 MM		
1201613010	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 130° X 10 FUROS - 3,5 MM		
1201815003	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 150° X 3 FUROS - 3,5 MM		
1201815004	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 150° X 4 FUROS - 3,5 MM		
1201815005	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 150° X 5 FUROS - 3,5 MM	43053510 A 43053590 43103510 A 43103590 43113510 A 43113590 43123510 A 43123590 20410 A 204120	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X"L" PASSO 1.25 MM
1201815006	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 150° X 6 FUROS - 3,5 MM		
1201815007	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 150° X 7 FUROS - 3,5 MM		
1201815008	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 150° X 8 FUROS - 3,5 MM		
1201815009	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 150° X 9 FUROS - 3,5 MM		
1201815010	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 150° X 10 FUROS - 3,5 MM		
1201909003	PLACA PEDIATRICA DISTAL DE FÊMUR 90° X 3 FUROS - 5,0 MM		
1201909004	PLACA PEDIATRICA DISTAL DE FÊMUR 90° X 4 FUROS - 5,0 MM		
1201909005	PLACA PEDIATRICA DISTAL DE FÊMUR 90° X 5 FUROS - 5,0 MM		
1201909006	PLACA PEDIATRICA DISTAL DE FÊMUR 90° X 6 FUROS - 5,0 MM		
1201909007	PLACA PEDIATRICA DISTAL DE FÊMUR 90° X 7 FUROS - 5,0 MM	021214 A 0212120 20714 A 207120 124914 A 124990	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X"L" MM PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X"L" MM AUTO ROSQUEANTE PARAFUSO LOCKING Ø 4.90X"L" MM
1201909008	PLACA PEDIATRICA DISTAL DE FÊMUR 90° X 8 FUROS - 5,0 MM		
1201909009	PLACA PEDIATRICA DISTAL DE FÊMUR 90° X 9 FUROS - 5,0 MM		
1201909010	PLACA PEDIATRICA DISTAL DE FÊMUR 90° X 10 FUROS - 5,0 MM		
1202010003	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 100° X 3 FUROS - 5,0 MM		
1202010004	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 100° X 4 FUROS - 5,0 MM		
1202010005	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 100° X 5 FUROS - 5,0 MM		
1202010006	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 100° X 6 FUROS - 5,0 MM		

Traumédica Instrumentais e Implantes Ltda.

Rua Horácio Coutinho dos Santos, 233 - Parque Industrial Lisboa, CEP 13052-774

Campinas, São Paulo, Brasil

Fone/Fax (19) 3265-0874

contato@traumédica.com.br www.traumédica.com.br

1202010007	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 100° X 7 FUROS - 5,0 MM		
1202010008	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 100° X 8 FUROS - 5,0 MM		
1202010009	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 100° X 9 FUROS - 5,0 MM		
1202010010	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 100° X 10 FUROS - 5,0 MM		
1202111003	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 110° X 3 FUROS - 5,0 MM	021214 A 0212120 20714 A 207120 124914 A 124990	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X"L" MM PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X"L" MM AUTO ROSQUEANTE PARAFUSO LOCKING Ø 4.90X"L" MM
1202111004	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 110° X 4 FUROS - 5,0 MM		
1202111005	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 110° X 5 FUROS - 5,0 MM		
1202111006	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 110° X 6 FUROS - 5,0 MM		
1202111007	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 110° X 7 FUROS - 5,0 MM		
1202111008	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 110° X 8 FUROS - 5,0 MM		
1202111009	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 110° X 9 FUROS - 5,0 MM		
1202111010	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 110° X 10 FUROS - 5,0 MM		
1202212003	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 120° X 3 FUROS - 5,0 MM	021214 A 0212120 20714 A 207120 124914 A 124990	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X"L" MM PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X"L" MM AUTO ROSQUEANTE PARAFUSO LOCKING Ø 4.90X"L" MM
1202212004	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 120° X 4 FUROS - 5,0 MM		
1202212005	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 120° X 5 FUROS - 5,0 MM		
1202212006	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 120° X 6 FUROS - 5,0 MM		
1202212007	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 120° X 7 FUROS - 5,0 MM		
1202212008	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 120° X 8 FUROS - 5,0 MM		
1202212009	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 120° X 9 FUROS - 5,0 MM		
1202212010	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 120° X 10 FUROS - 5,0 MM		
1202313003	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 130° X 3 FUROS - 5,0 MM	021214 A 0212120 20714 A 207120 124914 A 124990	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X"L" MM PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X"L" MM AUTO ROSQUEANTE PARAFUSO LOCKING Ø 4.90X"L" MM
1202313004	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 130° X 4 FUROS - 5,0 MM		
1202313005	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 130° X 5 FUROS - 5,0 MM		
1202313006	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 130° X 6 FUROS - 5,0 MM		
1202313007	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 130° X 7 FUROS - 5,0 MM		
1202313008	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 130° X 8 FUROS - 5,0 MM		
1202313009	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 130° X 9 FUROS - 5,0 MM		
1202313010	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 130° X 10 FUROS - 5,0 MM		
1202515003	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 150° X 3 FUROS - 5,0 MM	021214 A 0212120 20714 A 207120 124914 A 124990	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X"L" MM PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X"L" MM AUTO ROSQUEANTE PARAFUSO LOCKING Ø 4.90X"L" MM
1202515004	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 150° X 4 FUROS - 5,0 MM		
1202515005	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 150° X 5 FUROS - 5,0 MM		
1202515006	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 150° X 6 FUROS - 5,0 MM		
1202515007	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 150° X 7 FUROS - 5,0 MM		

Traumédica Instrumentais e Implantes Ltda.

Rua Horácio Coutinho dos Santos, 233 - Parque Industrial Lisboa, CEP 13052-774
 Campinas, São Paulo, Brasil
 Fone/Fax (19) 3265-0874
contato@traumédica.com.br www.traumédica.com.br

1202515008	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 150° X 8 FUROS - 5,0 MM		
1202515009	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 150° X 9 FUROS - 5,0 MM		
1202515010	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 150° X 10 FUROS - 5,0 MM		
1202614003	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 140° X 3 FUROS - 3.5 MM	43053510 A 43053590 43103510 A 43103590 43113510 A 43113590 43123510 A 43123590 20410 A 204120	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X"L" PASSO 1.25 MM
1202614004	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 140° X 4 FUROS - 3.5 MM		
1202614005	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 140° X 5 FUROS - 3.5 MM		
1202614006	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 140° X 6 FUROS - 3.5 MM		
1202614007	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 140° X 7 FUROS - 3.5 MM		
1202614008	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 140° X 8 FUROS - 3.5 MM		
1202614009	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 140° X 9 FUROS - 3.5 MM		
1202614010	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 140° X 10 FUROS - 3.5 MM		
1202714003	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 140° X 3 FUROS - 5.0 MM	021214 A 0212120 20714 A 207120 124914 A 124990	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X"L" MM PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X"L" MM AUTO ROSQUEANTE PARAFUSO LOCKING Ø 4.90X"L" MM
1202714004	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 140° X 4 FUROS - 5.0 MM		
1202714005	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 140° X 5 FUROS - 5.0 MM		
1202714006	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 140° X 6 FUROS - 5.0 MM		
1202714007	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 140° X 7 FUROS - 5.0 MM		
1202714008	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 140° X 8 FUROS - 5.0 MM		
1202714009	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 140° X 9 FUROS - 5.0 MM		
1202714010	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 140° X 10 FUROS - 5.0 MM		
1202809002	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 90° X 2 FUROS - 3,5 MM	43053510 A 43053590 43103510 A 43103590 43113510 A 43113590 43123510 A 43123590 20410 A 204120	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X"L" PASSO 1.25 MM
1202809003	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 90° X 3 FUROS - 3,5 MM		
1202809004	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 90° X 4 FUROS - 3,5 MM		
1202911002	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 110° X 2 FUROS - 3,5 MM	43053510 A 43053590 43103510 A 43103 590 43113510 A 43113590 43123510 A 43123590 20410 A 204120	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X"L" PASSO 1.25 MM
1202911003	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 110° X 3 FUROS - 3,5 MM		
1202911004	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 110° X 4 FUROS - 3,5 MM		
1203013002	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 130° X 2 FUROS - 3,5 MM	43053510 A 43053590 43103510 A 43103590 43113510 A 43113590 43123510 A 43123590	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM
1203013003	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 130° X 3 FUROS - 3,5 MM		

Traumédica Instrumentais e Implantes Ltda.

Rua Horácio Coutinho dos Santos, 233 - Parque Industrial Lisboa, CEP 13052-774
 Campinas, São Paulo, Brasil
 Fone/Fax (19) 3265-0874
contato@traumedica.com.br www.traumédica.com.br

1203013004	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 130° X 4 FUROS - 3,5 MM	20410 A 204120	PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X"L" PASSO 1.25 MM
120310902525	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 2 FUROS X LÂMINA 25 - 3,5 MM	43053510 A 43053590 43103510 A 43103590 43113510 A 43113590 43123510 A 43123590 20410 A 204120	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X"L" PASSO 1.25 MM
120310902530	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 2 FUROS X LÂMINA 30 - 3,5 MM		
120310902535	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 2 FUROS X LÂMINA 35 - 3,5 MM		
120310903525	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 25 - 3,5 MM		
120310903530	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 30 - 3,5 MM		
120310903535	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 35 - 3,5 MM		
120320900625	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 25 - 3,5 MM	43053510 A 43053590 43103510 A 43103590 43113510 A 43113590 43123510 A 43123590 20410 A 204120	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X"L" PASSO 1.25 MM
120320900630	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 30 - 3,5 MM		
120320900635	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 35 - 3,5 MM		
120320900640	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 40 - 3,5 MM		
120320900645	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 45 - 3,5 MM		
120320900650	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 50 - 3,5 MM		
120330901025	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 25 - 3,5 MM	43053510 A 43053590 43103510 A 43103590 43113510 A 43113590 43123510 A 43123590 20410 A 204120	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X"L" PASSO 1.25 MM
120330901030	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 30 - 3,5 MM		
120330901035	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 35 - 3,5 MM		
120330901040	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 40 - 3,5 MM		
120330901045	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 45 - 3,5 MM		
120330901050	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 50 - 3,5 MM		
120341000625	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 100° X 3 FUROS X LÂMINA 25 - 3,5 MM	43053510 A 43053590 43103510 A 43103590 43113510 A 43113590 43123510 A 43123590 20410 A 204120	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X"L" PASSO 1.25 MM
120341000630	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 100° X 3 FUROS X LÂMINA 30 - 3,5 MM		
120341000635	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 100° X 3 FUROS X LÂMINA 35 - 3,5 MM		
120341000640	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 100° X 3 FUROS X LÂMINA 40 - 3,5 MM		
120341000645	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 100° X 3 FUROS X LÂMINA 45 - 3,5 MM		
120341000650	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 100° X 3 FUROS X LÂMINA 50 - 3,5 MM		
120351300340	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 3 FUROS X LÂMINA 40 - 3,5 MM	43053510 A 43053590 43103510 A 43103590 43113510 A 43113590 43123510 A 43123590 20410 A 204120	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X"L" PASSO 1.25 MM
120351300345	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 3 FUROS X LÂMINA 45 - 3,5 MM		
120351300350	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 3 FUROS X LÂMINA 50 - 3,5 MM		
120351300355	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 3 FUROS X LÂMINA 55 - 3,5 MM		
120351300360	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 3 FUROS X LÂMINA 60 - 3,5 MM		
120351300440	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 40 - 3,5 MM		
120351300445	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 45 - 3,5 MM		

Traumédica Instrumentais e Implantes Ltda.

Rua Horácio Coutinho dos Santos, 233 - Parque Industrial Lisboa, CEP 13052-774
 Campinas, São Paulo, Brasil
 Fone/Fax (19) 3265-0874
contato@traumédica.com.br www.traumédica.com.br

120351300450	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 50 - 3,5 MM		
120351300455	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 55 - 3,5 MM		
120351300460	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 60 - 3,5 MM		
120360900640	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 40 - 5,0 MM	021214 A 0212120 20714 A 207120 124914 A 124990	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X"L" MM PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X"L" MM AUTO ROSQUEANTE PARAFUSO LOCKING Ø 4.90X"L" MM
120360900645	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 45 - 5,0 MM		
120360900650	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 50 - 5,0 MM		
120360900655	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 55 - 5,0 MM		
120360900660	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 60 - 5,0 MM		
120360900665	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 65 - 5,0 MM		
120360900670	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 70 - 5,0 MM		
120370901440	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 40 - 5,0 MM	021214 A 0212120 20714 A 207120 124914 A 124990	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X"L" MM PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X"L" MM AUTO ROSQUEANTE PARAFUSO LOCKING Ø 4.90X"L" MM
120370901445	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 45 - 5,0 MM		
120370901450	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 50 - 5,0 MM		
120370901455	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 55 - 5,0 MM		
120370901460	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 60 - 5,0 MM		
120370901465	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 65 - 5,0 MM		
120370901470	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 70 - 5,0 MM		
120381300045	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 45 - 5,0 MM	021214 A 0212120 20714 A 207120 124914 A 124990	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X"L" MM PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X"L" MM AUTO ROSQUEANTE PARAFUSO LOCKING Ø 4.90X"L" MM
120381300050	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 50 - 5,0 MM		
120381300055	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 55 - 5,0 MM		
120381300060	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 60 - 5,0 MM		
120381300065	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 65 - 5,0 MM		
120381300070	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 70 - 5,0 MM		
120381300075	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 75 - 5,0 MM		
120381300080	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 80 - 5,0 MM	43053510 A 43053590 43103510 A 43103590 43113510 A 43113590 43123510 A 43123590 20410 A 204120	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X"L" PASSO 1.25 MM
120390902525	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 2 FUROS X LÂMINA 25 - 3,5 MM		
120390902530	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 2 FUROS X LÂMINA 30 - 3,5 MM		
120390902535	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 2 FUROS X LÂMINA 35 - 3,5 MM		
120390903525	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 25 - 3,5 MM		
120390903530	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 30 - 3,5 MM		
120390903535	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 35 - 3,5 MM		
120400900625	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 25 - 3,5 MM	43053510 A 43053590 43103510 A 43103590	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50 X "L" MM
120400900630	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 30 - 3,5 MM		

Traumédica Instrumentais e Implantes Ltda.

Rua Horácio Coutinho dos Santos, 233 - Parque Industrial Lisboa, CEP 13052-774

Campinas, São Paulo, Brasil

Fone/Fax (19) 3265-0874

contato@traumedica.com.br www.traumédica.com.br

120400900635	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 35 - 3,5 MM	43113510 A 43113590 43123510 A 43123590 20410 A 204120	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X"L" PASSO 1.25 MM
120400900640	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 40 - 3,5 MM		
120400900645	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 45 - 3,5 MM		
120400900650	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 50 - 3,5 MM		
120410901025	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 25 - 3,5 MM	43053510 A 43053590 43103510 A 43103590 43113510 A 43113590 43123510 A 43123590 20410 A 204120	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X"L" PASSO 1.25 MM
120410901030	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 30 - 3,5 MM		
120410901035	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 35 - 3,5 MM		
120410901040	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 40 - 3,5 MM		
120410901045	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 45 - 3,5 MM		
120410901050	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA 50 - 3,5 MM		
120421000625	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 100° X 3 FUROS X LÂMINA 25 - 3,5 MM	43053510 A 43053590 43103510 A 43103590 43113510 A 43113590 43123510 A 43123590 20410 A 204120	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X"L" PASSO 1.25 MM
120421000630	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 100° X 3 FUROS X LÂMINA 30 - 3,5 MM		
120421000635	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 100° X 3 FUROS X LÂMINA 35 - 3,5 MM		
120421000640	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 100° X 3 FUROS X LÂMINA 40 - 3,5 MM		
120421000645	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 100° X 3 FUROS X LÂMINA 45 - 3,5 MM		
120421000650	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 100° X 3 FUROS X LÂMINA 50 - 3,5 MM		
120431300340	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 3 FUROS X LÂMINA 40 - 3,5 MM	43053510 A 43053590 43103510 A 43103590 43113510 A 43113590 43123510 A 43123590 20410 A 204120	TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING CORTICAL SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM TRAULOCKING SCREW Ø 3.50 X "L" MM PARAFUSO CORTICAL Ø 3.50X"L" PASSO 1.25 MM
120431300345	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 3 FUROS X LÂMINA 45 - 3,5 MM		
120431300350	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 3 FUROS X LÂMINA 50 - 3,5 MM		
120431300355	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 3 FUROS X LÂMINA 55 - 3,5 MM		
120431300360	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 3 FUROS X LÂMINA 60 - 3,5 MM		
120431300440	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 40 - 3,5 MM		
120431300445	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 45 - 3,5 MM		
120431300450	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 50 - 3,5 MM		
120431300455	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 55 - 3,5 MM	021214 A 0212120 20714 A 207120 124914 A 124990	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X"L" MM PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X"L" MM AUTO ROSQUEANTE PARAFUSO LOCKING Ø 4.90X"L" MM
120431300460	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 60 - 3,5 MM		
120440900640	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 40 - 5,0 MM		
120440900645	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 45 - 5,0 MM		
120440900650	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 50 - 5,0 MM		
120440900655	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 55 - 5,0 MM		
120440900660	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 60 - 5,0 MM		
120440900665	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 65 - 5,0 MM		
120440900670	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 70 - 5,0 MM		

Traumédica Instrumentais e Implantes Ltda.

Rua Horácio Coutinho dos Santos, 233 - Parque Industrial Lisboa, CEP 13052-774

Campinas, São Paulo, Brasil

Fone/Fax (19) 3265-0874

contato@traumédica.com.br www.traumédica.com.br

120450901440	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 40 - 5,0 MM	021214 A 0212120 20714 A 207120 124914 A 124990	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X"L" MM PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X"L" MM AUTO ROSQUEANTE PARAFUSO LOCKING Ø 4.90X"L" MM
120450901445	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 45 - 5,0 MM		
120450901450	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 50 - 5,0 MM		
120450901455	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 55 - 5,0 MM		
120450901460	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 60 - 5,0 MM		
120450901465	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 65 - 5,0 MM		
120450901470	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA 70 - 5,0 MM	021214 A 0212120 20714 A 207120 124914 A 124990	PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X"L" MM PARAFUSO CORTICAL Ø 4.50X"L" MM AUTO ROSQUEANTE PARAFUSO LOCKING Ø 4.90X"L" MM
120461300045	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 45 - 5,0 MM		
120461300050	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 50 - 5,0 MM		
120461300055	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 55 - 5,0 MM		
120461300060	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 60 - 5,0 MM		
120461300065	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 65 - 5,0 MM		
120461300070	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 70 - 5,0 MM		
120461300075	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 75 - 5,0 MM		
120461300080	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA 80 - 5,0 MM		

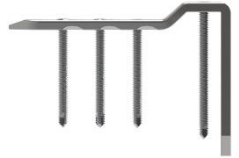
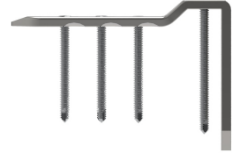
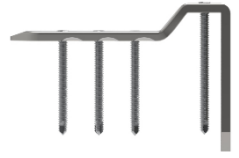
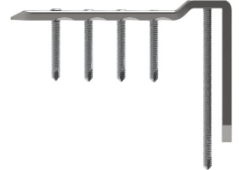
2. Indicação, finalidade ou uso a que se destina o dispositivo médico, segundo indicado pelo fabricante.

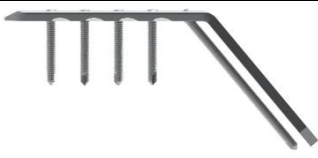
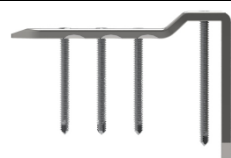
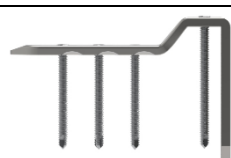
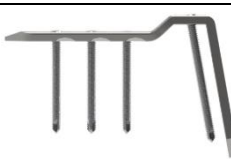
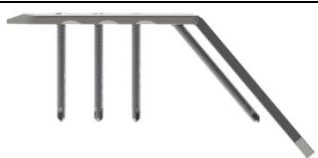
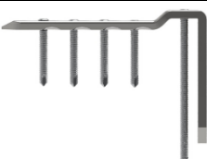
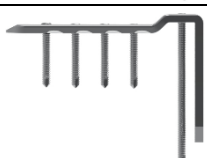
O Sistema TrauKids é indicado para fixação rígida temporária de fragmentos ósseos de fraturas ou osteotomias e correção de deformidades angulares femorais em crianças e adolescentes com idades entre 3 e 16 anos. O Sistema TrauKids possui as seguintes indicações específicas por produto, conforme Tabela 6.

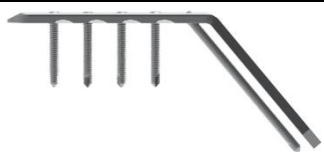
Tabela 6 – Indicação de uso do Sistema TrauKids

Imagem Ilustrativa	Código	Modelo	Indicação de Uso
	1201209003 A 1201209010	PLACA PEDIATRICA DISTAL DE FÊMUR 90° X N FUROS - 3,5 MM	OSTEOTOMIAS NO FÊMUR DISTAL E TRATAMENTO DE FRATURAS
	1201310003 A 1201310010	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 100° X N FUROS - 3,5 MM	OSTEOTOMIA EM VARO NO FÊMUR PROXIMAL E TRATAMENTO DE FRATURAS
	1201411003 A 1201411010	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 110° X N FUROS - 3,5 MM	OSTEOTOMIA EM VARO NO FÊMUR PROXIMAL E TRATAMENTO DE FRATURAS
	1201512003 A 1201512010	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 120° X N FUROS - 3,5 MM	OSTEOTOMIA EM VARO NO FÊMUR PROXIMAL E TRATAMENTO DE FRATURAS
	1201613003 A 1201613010	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 130° X N FUROS - 3,5 MM	OSTEOTOMIAS NO FÊMUR PROXIMAL E TRATAMENTO DE FRATURAS
	1201815003 A 1201815010	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 150° X N FUROS - 3,5 MM	OSTEOTOMIA NO FÊMUR PROXIMAL VALGIZANTE

	1201909003 A 1201909010	PLACA PEDIATRICA DISTAL DE FÊMUR 90° X N FUROS - 5,0 MM	CORREÇÃO DE ROTAÇÃO NO FÊMUR DISTAL E TRATAMENTO DE FRATURAS
	1202010003 A 1202010010	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 100° X N FUROS - 5,0 MM	OSTEOTOMIA NO FÊMUR PROXIMAL VARIZANTE
	1202111003 A 1202111010	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 110° X N FUROS - 5,0 MM	OSTEOTOMIA NO FÊMUR PROXIMAL VARIZANTE
	1202212003 A 1202212010	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 120° X N FUROS - 5,0 MM	CORREÇÃO DE ROTAÇÃO NO FÊMUR PROXIMAL E TRATAMENTO DE FRATURAS
	1202313003 A 1202313010	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 130° X N FUROS - 5,0 MM	CORREÇÃO DE ROTAÇÃO NO FÊMUR PROXIMAL E TRATAMENTO DE FRATURAS
	1202515003 A 1202515010	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 150° X N FUROS - 5,0 MM	OSTEOTOMIA NO FÊMUR PROXIMAL VALGIZANTE
	1202614003 A 1202614010	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 140° X N FUROS - 3.5 MM	OSTEOTOMIA NO FÊMUR PROXIMAL VALGIZANTE
	1202714003 A 1202714010	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 140° X N FUROS - 5.0 MM	OSTEOTOMIA NO FÊMUR PROXIMAL VALGIZANTE

	1202809002 A 1202809004	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 90° X N FUROS - 3,5 MM	OSTEOTOMIA NO FÊMUR PROXIMAL VARIZANTE
	1202911002 A 1202911004	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 110° X N FUROS - 3,5 MM	OSTEOTOMIA NO FÊMUR PROXIMAL VARIZANTE
	1203013002 A 1203013004	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL DE FÊMUR 130° X N FUROS - 3,5 MM	OSTEOTOMIA NO FÊMUR PROXIMAL VALGIZANTE
	120310902525 A 120310903535	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL 90° X "N" FUROS X LÂMINA N - 3,5 MM	OSTEOTOMIA NO FÊMUR PROXIMAL VARIZANTE E TRATAMENTO DE FRATURAS DO FÊMUR
	120320900625 A 120320900650	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA N - 3,5 MM	OSTEOTOMIA NO FÊMUR PROXIMAL VARIZANTE E TRATAMENTO DE FRATURAS DO FÊMUR
	120330901025 A 120330901050	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA N - 3,5 MM	OSTEOTOMIA NO FÊMUR PROXIMAL VARIZANTE E TRATAMENTO DE FRATURAS DO FÊMUR
	120341000625 A 120341000650	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 100° X 3 FUROS X LÂMINA N - 3,5 MM	OSTEOTOMIA NO FÊMUR PROXIMAL VARIZANTE E TRATAMENTO DE FRATURAS
	120351300340 A 120351300460	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X "N" FUROS X LÂMINA N - 3,5 MM	OSTEOTOMIA NO FÊMUR PROXIMAL VALGIZANTE E TRATAMENTO DE FRATURAS
	120360900640 A 120360900670	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA N - 5,0 MM	OSTEOTOMIA NO FÊMUR PROXIMAL VARIZANTE E TRATAMENTO DE FRATURAS

	120370901440 A 120370901470	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA N - 5,0 MM	OSTEOTOMIA NO FÊMUR PROXIMAL VARIZANTE E TRATAMENTO DE FRATURAS
	120381300045 A 120381300080	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA N - 5,0 MM	OSTEOTOMIA NO FÊMUR PROXIMAL VALGIZANTE E TRATAMENTO DE FRATURAS
	120390902525 A 120390903535	PLACA MINI PEDIATRICA PROXIMAL 90° X "N" FUROS X LÂMINA "N" - 3,5 MM	OSTEOTOMIA NO FÊMUR PROXIMAL VARIZANTE E TRATAMENTO DE FRATURAS
	120400900625 A 120400900650	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA "N" - 3,5 MM	OSTEOTOMIA NO FÊMUR PROXIMAL VARIZANTE E TRATAMENTO DE FRATURAS
	120410901025 A 120410901050	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 3 FUROS X LÂMINA "N" - 3,5 MM	OSTEOTOMIA NO FÊMUR PROXIMAL VARIZANTE E TRATAMENTO DE FRATURAS
	120421000625 A 120421000650	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 100° X 3 FUROS X LÂMINA "N" - 3,5 MM	OSTEOTOMIA NO FÊMUR PROXIMAL VARIZANTE E TRATAMENTO DE FRATURAS
	120431300340 A 120431300460	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 130° X "N" FUROS X LÂMINA "N" - 3,5 MM	OSTEOTOMIA NO FÊMUR PROXIMAL VALGIZANTE E TRATAMENTO DE FRATURAS
	120440900640 A 120440900670	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA "N" - 5,0 MM	OSTEOTOMIA NO FÊMUR PROXIMAL VARIZANTE E TRATAMENTO DE FRATURAS
	120450901440 A 120450901470	PLACA PEDIATRICA PROXIMAL 90° X 4 FUROS X LÂMINA "N" - 5,0 MM	OSTEOTOMIA NO FÊMUR PROXIMAL VARIZANTE E TRATAMENTO DE FRATURAS

	120461300045 A 120461300080	PLACA PEDIÁTRICA PROXIMAL 130° X 4 FUROS X LÂMINA "N" - 5,0 MM	OSTEOTOMIA NO FÊMUR PROXIMAL VALGIZANTE E TRATAMENTO DE FRATURAS
---	-----------------------------------	--	---

3. Precauções, restrições, advertências, cuidados especiais e esclarecimentos sobre o uso do dispositivo médico, assim como seu armazenamento e transporte.

O SISTEMA TRAUKIDS É DE USO ÚNICO! PROIBIDO REPROCESSAR!

3.1 Precauções e restrições

Em caso de dúvida sobre o material ou técnica de uso contate o fabricante ou o distribuidor mais próximo.

O Sistema TrauKids é fabricado com materiais não ferromagnéticos, portanto, o paciente pode realizar exames de ressonância magnética devendo informar ao técnico responsável pelo procedimento que possui um produto para saúde. Durante o exame de ressonância magnética poderá haver algum desconforto, como o aumento de temperatura do implante.

O fabricante se isenta de responsabilidade por danos causados pelo uso incorreto ou inadequado do material.

Nenhum material etiquetado ou designado como produto de uso único deve voltar a ser utilizado, reprocessado ou esterilizado novamente, e deverá ser descartado de forma adequada seguindo as orientações do tópico 3.4.10.

Para colocação adequada dos implantes, a Traumédica recomenda a utilização de instrumentais específicos e exclusivos do Sistema TrauKids. Os instrumentais devem ser adquiridos separadamente e **NÃO COMPÕEM** o produto, pois não integram a forma de apresentação dos implantes - embalagem individual. Os implantes da Traumédica somente devem ser utilizados com o auxílio dos instrumentais da Traumédica.

Resultados insatisfatórios podem ser observados em caso de:

- Seleção inadequada, o mau posicionamento e a má fixação do produto;
- Intolerância pelo paciente aos materiais utilizados na fabricação do produto;
- Impossibilidade do paciente em seguir o tratamento de reabilitação prescrito pelo cirurgião.

3.1.1 Eventuais efeitos adversos

Os efeitos adversos da implantação do Sistema TrauKids são os riscos associados a qualquer tipo de cirurgia, bem como a anestesia geral, incluindo:

- Perda de fixação, deslocamento e migração;
- Lesões dos vasos e nervos;
- Reações dos tecidos aos materiais de implante;
- Dor, hematoma e má cicatrização das feridas.

Efeitos adversos em qualquer produto para a saúde devem ser notificados ao fabricante e à equipe de Tecnovigilância do órgão sanitário competente (Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, através do site eletrônico www.anvisa.gov.br), com a descrição do evento e dos dados de rastreabilidade que permitam a análise da causa do evento. Recomenda-se

informar também o número de registro do produto. Todas as ocorrências notificadas a Traumédica são recebidas pelo Departamento de Tecnovigilância da Traumédica e submetidas à avaliação do Comitê Técnico para investigação. Ao término da investigação, uma carta resposta é elaborada pelo Departamento de Tecnovigilância para informar ao cliente se a reclamação é procedente ou não e, no caso de procedência da reclamação, a carta informa que providências serão tomadas. Utilizado corretamente não é esperada a ocorrência de efeitos adversos na utilização do Sistema TrauKids.

3.1.2 Contraindicação

- Condições físicas que eliminem ou tendem a eliminar o suporte adequado do implante ou retardar a cura, limitações no fornecimento de sangue, insuficiência na qualidade ou quantidade de osso, baixa qualidade de pele, infecções prévias etc.;
- Condições mentais ou neurológicas que tendam a substituir as habilidades dos pacientes ou a boa vontade para restringir as atividades durante o período de recuperação, mal de Parkinson, alcoolismo crônico, abuso de drogas, retardo ou enfermidade mental etc.;
- Sensibilidade corporal extrema: em caso de suspeita de hipersensibilidade ao material, é recomendado realizar testes apropriados antes de selecionar o material para implantação;
 - Pacientes acima de 17 anos;
 - Pacientes de 0 a 2 anos de idade;
 - Atrofia de pele ou falta de cobertura tecidual. Em uma profunda atrofia de pele, qualquer dispositivo de fixação interna deverá ser colocado com extremo cuidado, pois o risco de infecções ou problemas de recuperação das feridas é bem maior;
 - Infecções ativas;
 - Gravidez;
 - Obesidade;
 - Pacientes que não querem ou estão impossibilitados de seguir as instruções pós-operatórias devido às condições que apresentam (mental ou física);
 - Sensibilidade a corpo estranho. Quando houver suspeita de sensibilidade ao material, os testes apropriados devem ser realizados para excluir essa possibilidade antes do implante;
 - Limitações no fluxo sanguíneo e/ou infecções anteriores que possam tornar a cicatrização lenta e aumentar a possibilidade de infecção/ inflamação e/ou rejeição dos implantes;
 - Qualquer processo de doença degenerativa que possa afetar adversamente a colocação apropriada dos implantes.

Essas contraindicações podem ser relativas ou absolutas. No uso destes dispositivos deve cuidar-se do peso e das vantagens contra as possíveis complicações e considerar o exame clínico completo e as contraindicações listadas anteriormente.

3.2 Advertências

Este dispositivo médico exige procedimento cirúrgico especializado. Somente deverá ser executado por cirurgiões habilitados com treinamento específico incluindo diagnóstico, planejamento pré-operatório e protocolo cirúrgico. O uso do produto sem conhecimento das técnicas adequadas e/ou procedimentos e condições inadequadas, incluindo o ambiente cirúrgico, poderá prejudicar o paciente conduzindo a resultados não satisfatórios.

O fabricante se isenta de responsabilidade por quaisquer complicações relacionadas a indicações incorretas dos procedimentos cirúrgicos ou do uso de implantes, técnica operatória inadequada, falta de assepsia e também àquelas relacionadas aos limites dos métodos de tratamento.

É VEDADO a mistura de implantes de fabricantes distintos. O uso de implantes de fabricantes distintos insere riscos não considerados, eliminando qualquer responsabilidade da Traumédica por eventos adversos que possam acontecer. Não utilizar implantes de materiais diferentes dos apresentados.

É VEDADO a mistura de diferentes implantes não compatíveis entre si, que podem elevar o risco de corrosão, tampouco produtos similares de terceiros, cuja compatibilidade geométrica e mecânica não é conhecida. Os resultados clínicos e durabilidade do implante dependerão da técnica cirúrgica adotada, que deverá ser adequada ao tipo de produto.

Este produto é de uso único e não pode ser reprocessado, devendo seguir as orientações do tópico 3.4.10 para o descarte correto.

3.2.1 Moldagem do implante

As placas do Sistema TrauKids **não são passíveis de conformação**, pois foram projetadas para que o cirurgião calcule o ângulo de correção, assim, deve ser evitado que se amasse as placas do Sistema TrauKids, uma vez que estes fatores prejudicam a correta correção angular.

3.2.2 Limite de carga do implante

Embora os ensaios comprovem que a resistência mecânica dos produtos testados seja superior às cargas resultantes de atividades normais diárias, os implantes utilizados em cirurgia servem apenas para auxiliar e promover um processo normal de consolidação óssea. Esses implantes não têm a função de substituir estruturas ósseas ou de sustentar indefinidamente as tensões provocadas nas regiões com fraturas não consolidadas.

Dessa forma, o cirurgião deve orientar o paciente sobre os cuidados a serem tomados e o tipo de suporte físico, limite de carga, adequado a ser utilizado durante o tempo de uso do implante.

3.3 Cuidados especiais

A Traumédica não se responsabiliza pela colocação do produto com utilização de outros tipos de instrumentais.

Os instrumentais não fazem parte desse registro e devem ser adquiridos separadamente.

3.4 Esclarecimentos sobre o uso do dispositivo médico

É recomendado que as placas e parafusos do Sistema TrauKids sejam desembalados e esterilizados imediatamente antes do procedimento cirúrgico, de forma a preservar intactos o acabamento da superfície e a configuração original, e convém que eles sejam manuseados o mínimo possível, quando nessas condições.

3.4.1 Procedimentos relacionados a limpeza do dispositivo médico

Para reduzir o risco de contaminação é recomendado que os implantes sejam limpos antes da esterilização, utilizando uma solução bactericida e antifúngica de largo espectro. Entretanto, deve-se observar:

- Não utilize agentes de limpeza agressivos, tais como ácidos minerais fortes (sulfúrico, nítrico etc.);
- Não use escovas de metal, polidores ou produtos abrasivos;
- Leia sempre as instruções do fabricante do produto desinfetante, sugerindo as concentrações e período de imersão (utilize somente produtos registrados na ANVISA);
- Em banhos térmicos a água nunca deve exceder 45°C para impedir coagulação das proteínas.

3.4.2 Limpeza Manual

A limpeza manual dos implantes, quando efetuada adequadamente, pode evitar danos e/ou avarias. Entretanto deve-se observar:

- A temperatura da água não pode ultrapassar a temperatura ambiente. As concentrações dos agentes de limpeza devem ser corretas;
- Utilização de escova apropriada, de preferência de nylon. Nunca utilize escova de aço ou esponjas abrasivas. Isso provoca ruptura da camada passivadora, causando corrosão;
- Os implantes devem ser cuidadosamente enxaguados após a limpeza. Se a água utilizada contiver uma alta concentração de íons, deve ser utilizada água destilada;
- Os implantes devem ser secos, imediatamente, após o término da limpeza.

3.4.3 Máquinas de Limpeza

Se existirem máquinas de limpeza para os implantes, deve-se observar:

- Os implantes devem ser colocados em bandejas para não causar danos ou avarias uns aos outros;
- Leia sempre as instruções do fabricante da solução desinfetante, sugerindo as concentrações e período de imersão (utilize somente produtos registrados na ANVISA);
- O enxágue deve remover todos os agentes utilizados na limpeza, bem como a solução desinfetante;
- A água destilada é recomendada quando há uma alta concentração de íons na água da rede pública;
- Os implantes devem ser secos, imediatamente, após o término da limpeza.

3.4.4 Limpeza Ultrassônica

Os implantes que forem limpos através de banhos ultrassônicos devem ser inicialmente desinfetados. Deve-se observar:

- Leia sempre as instruções do fabricante da solução desinfetante, sugerindo as concentrações e período de imersão (utilize somente produtos registrados na ANVISA);
- A temperatura da solução desinfetante deve ser mantida rigorosamente entre 40° e 45°C;
- Enxágue os implantes cuidadosamente.

3.4.5 Esterilização

O Sistema TrauKids é fornecido **NÃO ESTÉREIS** e são de **USO ÚNICO** devendo ser esterilizados antes da sua utilização.

O local de esterilização do produto deverá proceder todos os requisitos técnicos de esterilização antes de submetê-lo ao processo de esterilização (testes biológicos e físicos da autoclave). É de total responsabilidade do hospital a validação do processo de esterilização.

Os parâmetros adequados do processo para cada equipamento e volume, devem ser analisados e conduzidos por pessoas treinadas e especializadas em processos de esterilização, assegurando a completa eficiência desse procedimento. É responsabilidade do usuário a garantia de utilização de um processo de esterilização adequado e a verificação da esterilidade de todos os dispositivos, em qualquer fase do processo.

Recomendamos apenas o processo em AUTOCLAVE A VAPOR para esterilização dos implantes.

Utilizar autoclave hospitalar, de acordo com o procedimento padrão adequado. Norma aplicável para esterilização em autoclave a vapor: *NBR ISO 17665-1 - Esterilização de produtos para saúde - Vapor Parte 1: Requisitos para o desenvolvimento, validação e controle de rotina nos processos de esterilização de produtos para saúde.*

Recomenda-se as temperaturas e tempos de esterilização, conforme tabela 7. É extremamente importante a validação dos parâmetros do processo do tipo específico do equipamento de esterilização e configuração para colocação dos produtos de cada instituição de saúde, bem como a apropriada manutenção preventiva e corretiva do equipamento de esterilização. Cabe ao utilizador validar todos os ciclos de esterilização e verificar a esterilidade dos dispositivos médicos.

Tabela 7: Parâmetros para Esterilização

Temperatura	Ciclo	Tempo de Exposição
121°C (250°F)	Gravidade	60 minutos (30 minutos no mínimo)
132°C (270°F)	Pré-vácuo	30 minutos (4 minutos no mínimo)

Obs. 1: O tempo só deverá ser marcado quando o calor da câmara de esterilização atingir a temperatura desejada.

Cabe ao operador validar todos os ciclos de esterilização e verificar a eficácia do processo de esterilização.

Obs. 2: Se o hospital não garantir o método de esterilização a vapor recomenda-se que os implantes não sejam implantados.

3.4.6 Advertências para manuseio

A correta manipulação do implante antes e durante a operação é decisiva para o sucesso do implante.

3.4.7 Técnica Cirúrgica

As técnicas cirúrgicas variam de acordo com a escolha do médico cirurgião, cabendo a ele a escolha final do método, tipo e dimensão dos produtos a serem empregados, bem como os critérios de avaliação dos resultados da cirurgia.

A Traumédica recomenda que o cirurgião leia e compreenda integralmente as informações contidas nas instruções de uso e na indicação de uso, conforme tabela 6. Caso necessite de alguma informação adicional, o cirurgião deve contatar a Traumédica antes da implantação do dispositivo médico. A implantação do dispositivo médico não deve ocorrer caso o cirurgião possua dúvidas quanto à indicação de uso, quantidade e/ou técnica cirúrgica a ser aplicado.

Todo procedimento cirúrgico deve considerar o caso clínico do paciente e também a qualificação do cirurgião. Apenas cirurgiões qualificados na implantação do dispositivo médico devem realizar a implantação do Sistema TrauKids.

A utilização deste material deverá ser feita apenas nas indicações e dentro dos parâmetros tecnicamente aceitos no país.

A Traumédica não é responsável pela indicação da melhor técnica cirúrgica a ser aplicada caso a caso, entretanto, como sequência possível a técnica cirúrgica é apresentada abaixo:

- **Técnica cirúrgica para as Placas de 3,50mm**

- 1- Determine o ângulo de correção e escolha a placa apropriada.
- 2- Posicione o paciente:
 - Deite o paciente de costas (decúbito dorsal) ou de lado (decúbito lateral).
- 3- Posicione o Fio Guia:
 - Insira um Fio de Kirschner (Ø2,0x150mm) na parte da frente do colo femoral para determinar a anteversão.
 - Alinhe o Fio com o centro do colo femoral usando um intensificador de imagem.
- 4- Defina o ângulo no Bloco de Orientação:
 - Ajuste o ângulo calculado no Bloco de Orientação.
 - Monte o Bloco de Orientação no Dispositivo de Posicionamento.
- 5- Posicione o Bloco de Orientação:
 - O Bloco de Orientação deve estar posicionado paralelamente à diáfise proximal do Fêmur nas vistas AP (anteroposterior) e lateral.
- 6- Determine o ponto de entrada para o Fio Guia:
 - Este ponto fica de 5mm a 6mm abaixo da epífise trocantérica na vista AP.
- 7- Insira o Fio Guia no Dispositivo de posicionamento:
 - Insira um Fio de Kirschner (Ø2,0x150mm) paralelo ao Fio de anteversão inicialmente posicionado na vista lateral / axial, no centro do colo femoral.
 - Remova o fio de anteversão.
- 8- Insira Fios adicionais:
 - Insira fios Ø2,8x200mm nos orifícios restantes do Dispositivo de Posicionamento.
 - Remova o Dispositivo de Posicionamento e o Bloco de Orientação após a inserção dos fios.
- 9- Determine o posicionamento da osteotomia:
 - Posicione a osteotomia 10mm abaixo dos fios guia para uma placa de 3,5mm.
 - Use um medidor de osteotomia para marcar a distância no osso com uma serra oscilante.
- 10- Realize a osteotomia:

- Faça um corte perpendicular à diáfise femoral com uma serra oscilante.
- 11- Insira a Placa:**
 - Coloque o Guia de Broca no orifício da Placa e deslize a Placa pelos fios Ø2,8x200mm.
 - Use o Medidor de Profundidade diretamente sobre o fio contra o Guia de Broca para determinar o comprimento do Parafuso.
 - Remova o Guia de Broca e o Fio.
 - Insira um Parafuso Ø3,5mm no orifício da Placa, usando a Chave T10 junto ao Torquímetro.
- 12- Repita a fixação dos Parafusos:**
 - Realize o mesmo procedimento no segundo orifício da Placa com o Fio Ø2,8x200mm e remova o fio inicial.
 - Insira o Guia de Broca no terceiro orifício proximal da Placa, faça um furo com a Broca Ø2,8mm, verifique a profundidade com o Medidor de Profundidade e insira o Parafuso Ø3,5mm com a Chave T10 junto ao Torquímetro.
- 13- Alinhe a placa:**
 - Com a cabeça do fêmur na posição desejada, alinhe a placa paralelamente ao eixo da diáfise femoral nas vistas AP e lateral.
- 14- Finalize a fixação:**
 - Insira o Guia de Broca nos furos distais, faça os furos com a Broca Ø2,8mm, determine a profundidade com o Medidor de Profundidade e insira os Parafusos de Bloqueio Ø3,5mm ou Parafusos Corticais Ø3,5mm com a Chave T10 e o Torquímetro.

Tabela 9: Técnica Cirúrgica para placas de 3.50 mm

Código	Descrição
2039	Fio Guia de 2.0 x 150 mm
113301	BOP - Bloco de orientação pediátrica 3.50
113302	Dispositivo de posicionamento do BOP 3.50
113308	Fio guia de 2.80 x 200 mm
113303	Medidor de osteotomia
113304	Guia de broca sem escala Ø 2.80 mm
20115	Broca Ø 2.80 x 200 mm
10241	Medidor de profundidade
10220	Chave Hexalobular T10
5912	Torquímetro
113305	Medidor de profundidade do fio

Para o uso e desempenho pretendido do Sistema TrauKids é necessária a utilização dos instrumentais, devendo ser adquiridos separadamente e possuem registros próprios na ANVISA com números: 80057410047, 80057410048 e 80057410058

- **Técnica cirúrgica para as placas de 5.0 mm**

- **Técnica cirúrgica para as Placas de 5,0mm**

- 1- Determine o ângulo de correção e escolha a placa apropriada.
- 2- Posicione o paciente:

- Deite o paciente de costas (decúbito dorsal) ou de lado (decúbito lateral).
- 3-** Posicione o Fio Guia:
 - Insira um Fio de Kirschner (Ø2,0x150mm) na parte da frente do colo femoral para determinar a anteversão.
 - Alinhe o Fio com o centro do colo femoral usando um intensificador de imagem.
- 4-** Defina o ângulo no Bloco de Orientação:
 - Ajuste o ângulo calculado no Bloco de Orientação.
 - Monte o Bloco de Orientação no Dispositivo de Posicionamento.
- 5-** Posicione o Bloco de Orientação:
 - O Bloco de Orientação deve estar posicionado paralelamente à diáfise proximal do fêmur nas vistas AP (anteroposterior) e lateral.
- 6-** Determine o ponto de entrada para o fio-guia:
 - Este ponto fica de 5mm a 6mm abaixo da epífise trocantérica na vista AP.
- 7-** Insira o Fio Guia no Dispositivo de Posicionamento:
 - Insira um Fio de Kirschner (Ø2,0x150mm) paralelo ao Fio de anteversão inicialmente posicionado na vista lateral / axial, no centro do colo femoral.
 - Remova o fio de anteversão.
- 8-** Inserir Fios adicionais:
 - Insira fios Ø2,8x200mm nos orifícios restantes do Dispositivo de Posicionamento.
 - Remova o Dispositivo de Posicionamento e o Bloco de Orientação após a inserção dos fios.
- 9-** Determine o posicionamento da osteotomia:
 - Posicione a osteotomia 13mm abaixo dos fios guia para uma placa de 5,0mm.
 - Use um medidor de osteotomia para marcar a distância no osso com uma serra oscilante.
- 10-** Realize a osteotomia:
 - Faça um corte perpendicular à diáfise femoral com uma serra oscilante.
- 11-** Insira a placa:
 - Coloque o Guia de Broca com a Bucha de Redução Ø4,35mm / Ø2,8mm no orifício da Placa e deslize a Placa pelos fios Ø2,8x200mm.
 - Remova a Bucha de Redução, em seguida utilize o Medidor de Profundidade para verificar o comprimento do Fio sobre o Guia de Broca e determinar o comprimento do Parafuso.
 - Remova o fio.
 - Aumente o furo de Ø2,8mm para Ø4,35mm com a Broca Ø4,35mm.
 - Remova o guia de broca.
 - Insira um Parafuso Ø4,9mm no orifício, usando a Chave Sextavada 3,5mm junto ao Torquímetro.
- 12-** Repita a fixação dos parafusos:
 - Realize o mesmo procedimento no segundo orifício da Placa com o Fio Ø2,8x200mm e remova o fio inicial.
 - Insira o Guia de Broca no terceiro orifício proximal, faça um furo com a Broca Ø4,35mm, verifique a profundidade com o Medidor de Profundidade e insira o Parafuso Ø4,9mm com a Chave Sextavada 3,5mm junto ao Torquímetro.

13- Alinhe a placa:

- Com a cabeça do fêmur na posição desejada, alinhe a placa paralelamente ao eixo da diáfise femoral nas vistas AP e lateral.

14- Finalize a fixação:

- Insira o Guia de Broca nos furos distais, faça os furos com a Broca Ø4,35mm, determine a profundidade com o Medidor de Profundidade e insira os Parafusos de Bloqueio Ø4,9mm ou Parafusos Corticais Ø4,5mm com a Chave Sextavada 3,5mm junto ao Torquímetro.

Tabela 10: Técnica Cirúrgica para placas de 5.0 mm

Código	Descrição
2039	Fio Guia de 2.0 x 150 mm
113306	BOP - Bloco de orientação pediátrica 5.0
113307	Dispositivo de posicionamento do BOP 5.0
113308	Fio guia de 2.80 x 200 mm
113309	Medidor de osteotomia
113310	Guia de broca Ø 4.35 mm
2061	Broca Ø 4.35 mm
2068	Medidor de profundidade
2054	Chave Sextavada 3.5 mm Com Engate Rápido
7811	Torquímetro
113305	Medidor de profundidade do fio
113311	Bucha de Redução

Para o uso e desempenho pretendido do Sistema TrauKids é necessária a utilização dos instrumentais, devendo ser adquiridos separadamente e possuem registros próprios na ANVISA com números: 80057410047, 80057410048 e 80057410058

3.4.8 Tratamento pós-operatório

A mobilização física deve ser iniciada imediatamente após o pós-operatório, incluindo exercícios de movimentação. Restrições podem ser apropriadas em casos especiais, a critério do cirurgião.

O nível de atividade de um paciente e a observação das restrições pós-operatórias são fatores importantes na vida funcional de qualquer dispositivo de fixação interna. Os pacientes devem ser avisados das consequências da não observação das instruções pós-operatórias.

Os dispositivos não substituem o osso saudável. Não deve ser aplicada carga após a cirurgia, uma vez que o paciente deverá seguir as recomendações médicas para que o implante exerça sua função.

Não se pode esperar que os implantes suportem o esforço exercido sobre o dispositivo pelo suporte total ou parcial do peso corporal ou de carga, particularmente na presença de não consolidação, consolidação retardada ou recuperação incompleta, podendo gerar falha ou quebra do implante. Por isso, é importante que seja mantida a imobilização do local da fratura até ser estabelecida uma firme consolidação óssea. Fatores como o peso corporal, nível de atividade e respeito às limitações do suporte de peso corporal e de cargas por parte do paciente devem ser avaliados pelo cirurgião.

Os cuidados pós-operatórios incluem, mas não se limitam aos seguintes aspectos:

- Restrição do nível de atividade até se atingir a consolidação total do osso;

- Utilização de suporte externo adequado até consolidação total do osso e cuidados contra a remoção não supervisionada deste suporte;
- Evitar atividades que possam ocasionar torções, quedas, choques, que poderiam ocasionar falhas no dispositivo;
- Cuidados com a cicatrização.

3.4.9 Remoção do implante

É do cirurgião a decisão final sobre a remoção do implante. Recomendamos que sempre que possível e prático para o paciente, o implante deve ser removido, visto que sua função como um auxiliar na consolidação foi desempenhada. A remoção do implante deve ser seguida por um adequado pós-operatório para evitar o risco de uma nova fratura.

Os riscos da remoção também incluem os riscos associados a qualquer tipo de cirurgia, bem como os riscos associados à anestesia geral.

Caso o cirurgião necessite fazer a remoção para uma análise ou investigação, o implante deve ser explantado, se possível na presença de pessoa autorizada pelo fabricante. Esse produto deverá ser enviado para análise, conforme determinado pelo fabricante.

3.4.10 Forma de descarte do implante utilizado

Conforme a Resolução RE nº 2.605, de 11/08/06, dispositivos implantáveis de qualquer natureza enquadrados como de uso único são proibidos de serem reprocessados. Implantes que forem removidos da embalagem interna e inseridos dentro do ambiente cirúrgico, mesmo que não tenham sido implantados ou contaminados por outras fontes, devem ser tratados como material contaminado, o mesmo ocorrendo com dispositivos explantados. Esses dispositivos devem ser inutilizados para uso antes do descarte. Recomendamos que as peças sejam deformadas ou cortadas para sua **inutilização**.

3.4.11 Rastreabilidade dos produtos

A TRAUMÉDICA, como fabricante de produtos para a saúde, é responsável pela rastreabilidade do Sistema TrauKids.

A rastreabilidade é garantida pela marcação do **LOGOTIPO | CÓDIGO | LOTE | MATERIAL** no corpo do implante (marcação inviolável e com numeração única) e pelas informações constantes nas etiquetas de rastreabilidade fornecidas anexas ao produto (embalagem primária). Caso seja necessária a retirada do implante do corpo do paciente, todas as informações contidas no mesmo permanecerão inalteradas.

Dentro da embalagem primária estão contidas cinco etiquetas contendo o código do produto, descrição do produto, número do lote, número de registro na ANVISA e identificação do fabricante. Uma etiqueta é de controle do fornecedor, outra fica na documentação fiscal de venda, uma terceira etiqueta é fixada no prontuário clínico do paciente, a quarta etiqueta fica com o cirurgião responsável e a última etiqueta é entregue ao paciente para que este tenha consigo as informações referentes ao implante.

3.5. Armazenagem e Transporte

O local de armazenamento do dispositivo médico deve estar limpo, seco, protegido de luz solar e iluminado de forma a manter as condições ideais de armazenamento. Ressalta-se que os implantes não devem ser jogados ou batidos, a fim de garantir que permaneçam livres de danos.

O transportador deve ser informado sobre o conteúdo a ser transportado e o prazo de entrega. O local de armazenamento do transporte deve ser limpo, seco e protegido da luz. Ressalta-se que os implantes não devem ser jogados ou batidos, a fim de garantir que permaneçam livres de danos.

3.5.1 Cuidados no manuseio

Os implantes devem ser manuseados com cuidado. O cirurgião deve manusear o dispositivo apenas no momento da implantação. Qualquer implante que tenha caído, arranhado, entalhado, esteja com a embalagem aberta, danificada, molhada ou que tenha sofrido qualquer outro dano deve ser descartado.

4. Formas de apresentação do dispositivo médico

Todas as Placas e Parafusos do Sistema TrauKids são comercializados unitariamente em embalagem plástica transparente de polietileno de baixa densidade (PEBD), selada termicamente, identificada com etiqueta autoadesiva, acompanhado de 05 Etiquetas de rastreabilidade, como indicado na Figura 3 e 4.



Figura 3 – Placa dentro da embalagem com a rotulagem.

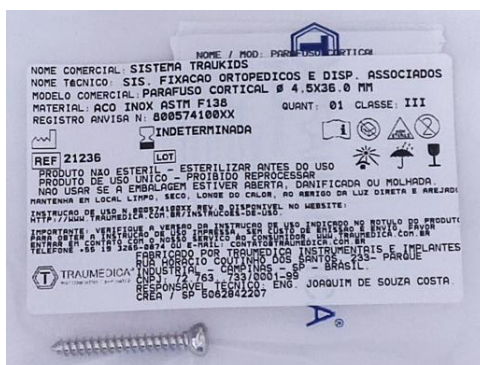


Figura 4 – Parafuso dentro da embalagem com a rotulagem.

5. Modelos de rótulos e instruções de uso

5.1 Modelo de Rotulagem

Dentro da embalagem primária seguem 5 (cinco) etiquetas de rastreabilidade, contendo os seguintes dados:

- código do produto;
- descrição do produto;
- número do lote;
- número de registro na ANVISA;
- identificação do fabricante.

Recomenda-se que as etiquetas de rastreabilidade sejam utilizadas conforme indicado abaixo:

- Etiqueta 1: fixada no prontuário clínico do paciente;
- Etiqueta 2: fixada na documentação fiscal de venda;
- Etiqueta 3: é de controle do fornecedor;
- Etiqueta 4: é entregue ao cirurgião responsável;
- Etiqueta 5: é entregue ao paciente.

A Traumédica recomenda as seguintes observações:

- Recomenda-se que o hospital mantenha a identificação dos implantes utilizados no prontuário do paciente, para tornar possível a rastreabilidade dos implantes utilizados através do registro de, no mínimo, código, número de lote e número de registro do produto;
- Recomenda-se que as informações de rastreabilidade registradas no prontuário sejam repassadas ao paciente;
- Eventos adversos em qualquer produto para a saúde devem ser notificados ao fabricante com a descrição do evento e dos dados de rastreabilidade que permitam a análise da causa do evento. Recomenda-se informar também o número de registro do produto. Essas informações constam nas etiquetas de rastreabilidade que acompanham a embalagem do produto.

5.2 Modelo de Instrução de Uso

Visando a praticidade e a facilidade de ter acesso às informações contidas nas Instruções de Uso de nossos produtos, a Traumédica em acordo com a RDC Nº 751, de 15 de setembro de 2022 estabelecida pela ANVISA, disponibiliza os documentos para download no site: <http://www.traumedica.com.br/instrucoes-de-uso>. Importante: Verifique a versão da Instrução de Uso indicado no rótulo do produto, juntamente com o nº do registro e clique em "Download" no documento desejado para iniciar a transferência do arquivo.

Para obter a Instrução de Uso impressa sem custo de emissão e envio, favor entrar em contato com o nosso Serviço ao Consumidor através do telefone +55 (19) 3265-0874 ou pelo e-mail: contato@traumedica.com.br

Ivalto do Carmo Moreira
Responsável Legal

Eng.º Joaquim de Souza Costa
Responsável Técnico